



Fyllnadsmaterial av silikon
Vettec's nya fyllnadsmaterial av silikon appliceras under en sula för dämpning, fullständig tätning och för skydd av hästens egna sulor.

Silicone Pad Material
Vettec's New Silicone packing material is automatically dispensed under a pad to cushion, seal, and protect the equine foot.

Standardtillämpning Standard Application



1
Sil-Pak appliceras under en sula av något slag.
Materialet tättar hoven väl så att det inte kan bildas några ansamlingar av smuts och fukt.

Sil-Pak is being applied. Complete coverage of the sole prevents moisture and debris migration.

Standardtillämpning

Standard Application

Anteckningar

Notes



2

Sil-Pak måste alltid användas i kombination med en sula (plast/läder).

Sil-Pak can only be used in combination with a (plastic or leather) pad. The fast setting liquid formula eliminates voids and provides complete protection.



3

Sil-Pak fäster bra på hovens sula och isolerar allt mycket bra. Här Sil-Pak efter 6 veckors användning.

Sil-Pak adheres to the sole and fills up the sole completely. Here Sil-Pak after 6 weeks.



4

Sulans och strålens skick efter borttagning av Sil-Pak.

The sole and frog are in great condition after six weeks under Sil-Pak