



(Snabbhärdande lim)
 Detta lim härdar på 30 sekunder och kan användas för små reparationer, utjämnning av hovarna, uppbyggnad av en bra hälvinkel, applicering av specialtillskurna hästskor och förlängningar för föl.

(Adhesive)
 This 30 second set hoof adhesive can be used for small repairs, leveling the feet, building heel angles, making custom shoes and foal extensions.

Ändring av hälvinkeln Changing Heel Angles

Detta kan göras oavsett om hästen skos eller inte.

I det här fallet kommer hästen inte att skos, så längs kanten bygger vi först upp en tunn "hästsko" utav Super Fast.

Hoven förbereds på samma sätt som vid limning av hästskor. All svag och porös struktur måste avlägsnas och därefter torkas.

This can be done whether the horse will have shoes on or not.

In this case the horse will not wear shoes so we build a rim shoe out of the Super Fast first.

Foot prep is the same as for gluing on shoes, all weak, flaky structure must be removed and then dried.



1 Lägga på materialet och håll fast hoven i samma position i 2,5 minuter.

Apply material and hold for 2½ minutes.



2 Efter att det första grundskiktet lagts på, appliceras material i hälzonen tills önskad höjd uppnåtts. Håll fast hoven i 2,5 minuter.


After initial base is put on, apply material to the heel area to approximate depth. Hold foot up for 2½ minutes.



3 Raspa till önskad form.

Rasp to desired angle and shape.

Förlängningar för föl Foal Extensions

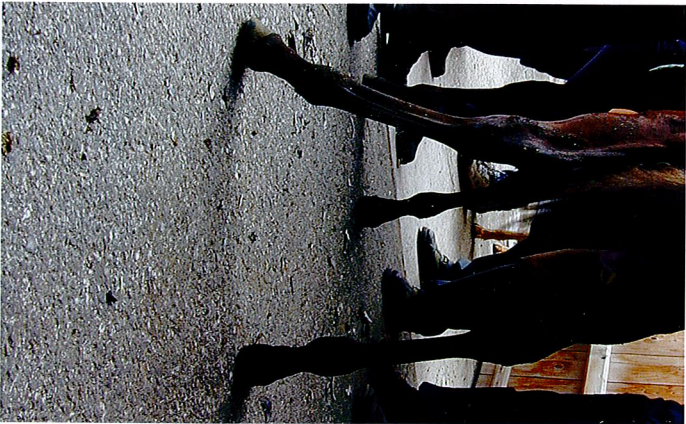

Föl med varus-/valgusvikelse från medellinjen. Föl före behandlingen. Sidvis förlängning med Super Fast.

Windswept foal before trimming. Super Fast lateral extension to be applied.

OBS!
Genom att verka hovarna korrekt står föllet redan räkare



Föl efter behandlingen. Foal after trim.

NOTE
with just a proper trim, foal standing more upright.

Förlängningar för föl Foal Extensions



Verka hoven.

Alla bakterier runt den vita linjen måste också tas bort. Dejs måste du undvika att bakterier blir inneslutna och dejs fäster Super Fast bättre på ett bakteriefritt område."

Trim the hoof.

Any bacteria around the white line is also removed. You do not want to trap any bacteria and it is a weak spot to adhere to.

OBS!
Sulan bearbetas och all lös struktur avlägsnas.



TORKA, TORKA, TORKA

DRY, DRY, DRY

NOTE
That sole is pared out, and all loose structure is being removed.

Förlängningar för föl Foal Extensions



3 Läggs först på ett skikt Super Fast. Hos föl som är 0-30 dagar lägger man inte Super Fast andå upp på hälsarna. Det skulle kunna hindra hornväxten. Håll upp föten cirka 2 minuter. Läggs på ett andra skikt om det behövs.

Apply first layer of Super Fast. For foals 0-30 days old, do not go heel to heel with the material. Hold foot up for about 2 minutes. Apply second layer if needed.



4 Se till att du inte kommer för långt in på sulan med Super Fast. Avlägsna överflödigt produkt med handen (använd handskar!). Gör det direkt.

Be careful not to come too far onto sole with the Super Fast. Use a gloved finger to remove any excess. This must be done right away.



5 När grundskiktet är färdigt måste du raspa ytan och kontrollera balansen.

After ground layer is done, rasp level and check for proper balance.



6 För att lägga på den sidoförlängningen ställer du fölet på en plastplatta/ en skumplatta eller en bit papp. Läggs på så mycket Super Fast som behövs på utsidan och längs hovväggen.

To apply the lateral extension, stand foal on plastic or foam board or paper. Apply Super Fast outward and up onto the wall the distance you need.



7 Läggs på ett antal skikt efter behov, inte för tjockt på en gång eftersom värmen kan bli för mycket för fölet.

Apply layers as needed. Do not apply too thick at once as heat on foals may be too much.




8 Bild på sulan med grundskikt och 3 förlängningsskikt.

Solar view of ground layer and 3 lateral layers applied.



9 Färdig produkt, fick gå ute dygnet runt på en på bete i bergrik terräng tillsammans med mären. Super Fast satt kvar 7 veckor.

Finished Product: Foal was turned out 24/7 in mountain pasture with mare. Stayed on 7 weeks.

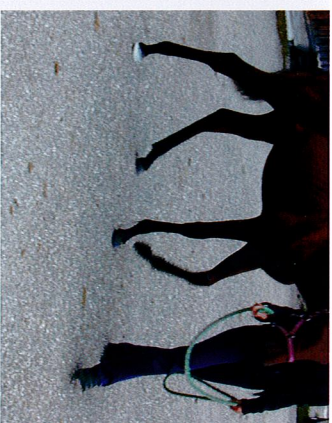

OBBS!
I de flesta fall måste du anpassa vinkeln med 2-3 veckors mellanrum.

NOTE
Most of the time you will want to adjust angle at 2 - 3 weeks.

Tillfällig skoersättning Temporary Shoes



Här är förberedningen av hoven av avgörande betydelse för hur det ska lyckas.

Avlägsna alla lösa, färgande delar av sula och hovvägg. Varje avskorning vid den vita linjen måste också avlägsnas.

Foot prep is key to success here.

Remove all loose, flaky sole and wall. Any separation at the white line must also be removed.



Det spelar ingen roll i vilket klimat du befinner dig eller i vilket skick hoven är. TORKA HOVEN! Det förekommer alltid fukt och Super Fast fäster i fukten, inte på hoven.

No matter what part of the country you're in or the condition of the hoof, DRY IT! There's moisture present and Super Fast will stick to moisture, not the hoof.

Tillfällig skoersättning Temporary Shoes



Börja vid den ena hälen och lägg på en "korv" av produkten runt om hovens hela markyta. Om det finns en fördjupning någonstans, kan du återvända och lägga på mer produkt innan du sätter ner foten. Det kan eventuellt också korrigeras i efterhand genom att tillsätta material.

Start at one heel and run a bead around the entire ground surface of the hoof. If you have a low spot, you can come back and add before you set the foot down or later on.



Efter applicering av produkten ska hoven hållas upp i 2,5 minuter. Börja mäta tiden efter att du kommit till den andra hälen med materialet (alltså inte när du börjar med påläggningen av produkten).

After applying, hold the hoof up for 2½ minutes. Start timing after the material has reached the second heel (not at the start of application).



Efter 2,5 minuter försöker du röra materialet vid hälarna. Om det är hovballarna som rör sig i stället, har materialet härdnat och kan hoven sättas ner.


After 2½ minutes try to move the material at the heels and if the bulbs move instead, the material has cured & the foot can be put down.

Tillfällig skoersättning Temporary Shoes



6
Raspa till form och balans efter applicering och sluthärdning.

After application and final set, rasp to shape and balance.

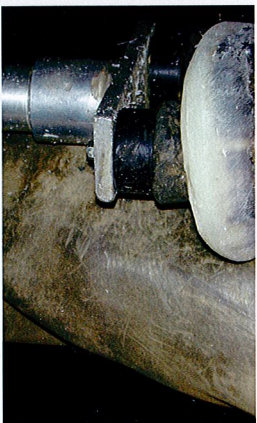

OBSI!
Om hästen ska ridas, rekommenderas att lägga på ett extra skikt på yttreväggen. Det skiktet fäster grundskiktet vid yttreväggen och ger därigenom stabilitet.

NOTE
If the horse will be ridden, it is advisable to add a layer onto the outer wall. This layer bonds the ground layer to the outer wall providing stability.



Tillfälliga hästskoersättningar med Super Fast skänker hästar med svaga, sköra hovväggar lite vila från fastspjåkade hästskor.
Applacera Super Fast på hoven för att ge stöd, och på hällarna för att ändra vinkeln.



Super Fast Temporary Shoes give horses with weak, brittle walls a break from nailed on shoes.
Apply Super Fast to the hoof to provide medial or lateral support, as well as to the heels to change the angle.

Super Fast & Hearthar-form Super Fast & Hearthar Mold



1
Placea hearthar-formen på hästskon.
Place Hearthar mold on shoe.



2
Fyll med Vettec Super Fast.
Fill with Vettec Super Fast.




3
Låt stelna och ta bort formen.
Let set and remove mold.



4
Raspa till önskad höjd och vinkel.
Rasp to desired height and angle.



5
Hearthar är klar med jämn strålkontakt.
Finished Hearthar with even frog contact.

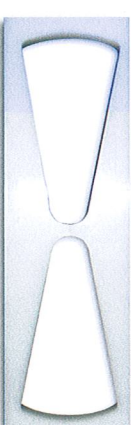

Ref.	Beskrivning
46035	Hearthar-form
Ref.	Description
46035	Hearthar Mold